

Préservatif masculin

CE 0120 En latex de caoutchouc naturel, surface lisse, lubrifié, avec réservoir, incolore, conforme à la norme NF EN ISO 4074. Largeur 53mm +/-2, contrôlé individuellement électroniquement.

PL Pleasure Latex Products
45800 Jeram, Selangor, Malaysia

Date d'obtention du marquage CE : 1998

Conseils d'utilisation : Le préservatif doit être placé sur le pénis en érection avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire afin d'aider à prévenir toute maladie sexuellement transmissible et la grossesse. Afin de réduire les risques de rupture du préservatif, l'utilisation d'un gel est recommandée : éviter l'utilisation de lubrifiants huileux tels que gelées à base de pétrole et huile pour bébé qui provoquent une dégradation du latex. N'utiliser que des gels à base d'eau. Consulter un médecin ou un pharmacien en ce qui concerne la compatibilité des préservatifs avec les remèdes vendus librement ou prescrits et destinés à être appliqués dans le vagin ou sur le pénis.

Précautions d'utilisation : ne jamais réutiliser un préservatif. La réutilisation augmente considérablement le risque de ruptures et de transmission d'IST. Conservez les préservatifs dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de l'ozone.


Mode d'emploi :

1. Ouvrez délicatement l'emballage prédécoupé à la main, n'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus (couteau, ciseaux...). Prenez garde de ne pas abîmer le préservatif avec les ongles ou bagues.
2. Appliquez le préservatif sur le gland découvert en pinçant le réservoir du bout du préservatif pour en chasser l'air.
3. Déroulez le préservatif en maintenant le réservoir.
4. Dès la fin du rapport et avant la fin de l'érection, retirez-vous en maintenant le préservatif à sa base.
5. Jetez le préservatif usagé à la poubelle après l'avoir noué.

LT Laboratoire Terpan www.terpan.fr

Strawbag® - Notice d'utilisation

1. Mouchez-vous énergiquement avec le mouchoir en papier.
2. Écrasez le produit avec le pestle (mini-pilon) sur le mini plateau, afin qu'aucune particule ne reste bloquée dans les poils du nez et n'abîme les muqueuses.
3. Utilisez une paille neuve à chaque inhalation.
4. Rincez-vous les narines avec de l'eau propre après chaque inhalation. Aspirez l'eau par le nez et recrachez-la par la bouche afin d'irriguer les muqueuses déshydratées. La muqueuse des narines est très sensible et les poils qui la tapissent peuvent retenir des particules qui provoquent une irritation, des saignements des nécroses voire une perforation de la cloison nasale. Si des brûlures au niveau des sinus persistent, s'il y a des saignements ou apparition de croûtes dans le nez, consultez un médecin.

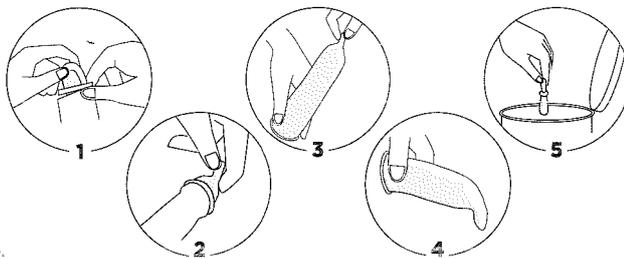

Numéro de lot et date de péremption inscrite sur chaque produit.

PER5157 - Notice révisée : janvier 2015

Gel intime à base d'eau

CE 0459 Sans parabens, compatible avec les préservatifs, à haut pouvoir lubrifiant.

Mode d'emploi : avant la pénétration, déposez une dose de gel à l'entrée de l'orifice à pénétrer ou sur le préservatif.

PL Laboratoire Terpan
14, rue du clos Hubert
28320 Gallardon - FRANCE

Date d'obtention du marquage CE : 2007

Pour le kit Strawbag® version C Physiodose Sérum physiologique

CE 0459 Stérile, non injectable. Usage unique et individuel. **STERILE A**

Conservation : ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vue du risque rapide de contamination bactérienne. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'unidose.

Mode d'emploi : détachez une unidose et l'ouvrez en tournant la partie supérieure. Inclinez la tête en arrière. Introduisez délicatement l'embout dans la narine et appuyez légèrement sur l'unidose. Répétez l'opération pour l'autre narine. Redressez la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyez l'excédent.

LT Laboratoires GILBERT
928, avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair - FRANCE

Date d'obtention du marquage CE : 1999