

STERIMIX

Mode d'emploi

Stericup

- Détacher le papier pelable, appuyer sur la languette du Stericup pour le sortir de son emballage en évitant de toucher l'intérieur du récipient.
- Positionner le signe «UP» du manche vers le haut et introduire la languette dans les rainures du manche.

Sterifilt

- Introduire l'embout de la seringue dans le Sterifilt*. Faire tourner le filtre tout en appuyant légèrement pour obtenir l'étanchéité.
- Aspirer lentement.

*Si vous utilisez une seringue sans aiguille attachée, placez le Sterifilt sur l'emplacement de l'aiguille. Attachez l'aiguille après que la préparation ait été aspirée et le Sterifilt retiré.

Tampon sec

- Après l'injection, comprimer le point d'injection avec le tampon sec afin de coaguler et d'absorber le sang.

Précautions d'emploi

Stericup

- Ne jamais toucher l'intérieur du Stericup avec les doigts. Une bactérie, un champignon ou un virus peut contaminer la solution. Le virus de l'hépatite C reste présent sur la surface de la peau ainsi que dans les traces de sang, même invisibles.
- Ne jamais utiliser un Stericup® déjà utilisé ; même nettoyé, le récipient peut contenir des virus provenant d'une seringue, d'un filtre, des doigts ou de l'eau de quelqu'un d'autre.

Sterifilt

- Une deuxième utilisation du Sterifilt est moins efficace et déconseillée.
- La filtration n'élimine pas les bactéries, ni les virus.