

# DIG DAM DOM / DIGUE DENTAIRE

## Mode d'emploi

- 1) Vérifiez que la date de péremption n'est pas dépassée et que l'emballage est bon état. Si ce n'est pas le cas, jeter la digue buccale et prenez-en une autre.
- 2) Ouvrez l'emballage à la main avec précaution (n'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus). Prenez garde de ne pas abîmer la digue avec les ongles ou les bijoux...
- 3) Placez la digue sur la vulve ou l'anus de votre partenaire et tenez-la afin qu'elle ne se déplace pas.  
Si vous souhaitez utiliser du lubrifiant, vérifiez que celui-ci est bien compatible avec la matière de votre digue buccale.
- 4) Dès que vous avez fini, jetez la digue à la poubelle.

## Précautions d'emploi

Il est impératif de ne pas réutiliser la digue buccale, ne pas la retourner au cours de l'utilisation, ne pas utiliser la même digue pour un anulingus puis un cunilingus ou inversement.