

## SERINGUE 1ML – EMI (Espace Mort Intermédiaire)

### Mode d'emploi

- Vérifier l'intégrité du blister, ainsi que la date de péremption avant de sortir la seringue de son blister.
- Aspirer le produit au travers d'un filtre, soit à l'aide d'un filtre coton, d'un filtre toupie ou d'un Sterifilt®. Pour ajuster le Sterifilt® sur la seringue, effectuer une légère rotation associée à une légère pression.
- Ajuster l'aiguille choisie à la seringue.
- Insérer l'aiguille dans la veine, un léger retour du piston permet de vérifier que l'aiguille se trouve bien à l'intérieur d'une veine.
- Injecter lentement et dans le sens de la circulation veineuse (vers le cœur).
- Retirer l'aiguille lentement de la veine. Comprimer le site d'injection à l'aide d'un tampon sec.
- Jeter la seringue usagée dans un container prévu à cet effet.

### Précautions d'emploi

Le blister est garant de la stérilité de l'outil, ne l'ouvrir qu'au moment de l'utilisation de la seringue.

Ne pas réutiliser. Ne pas partager. Une seringue ne doit être utilisée qu'une seule fois, tout comme l'ensemble du matériel de préparation à l'injection.